



1 Identifier les aides auditives

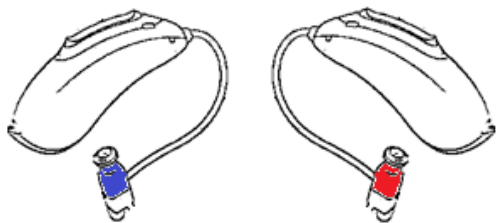

L'écouteur droit est rouge et l'aide auditive droite a une marque rouge.
L'écouteur gauche est bleu et l'aide auditive gauche a une marque bleue.

2 Eteindre les aides auditives tous les soirs au niveau du tiroir pile et les mettre en marche tous les matins

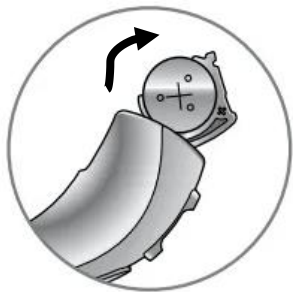

Ouvrir
le tiroir
pile.




Fermer
le tiroir
pile.


3 Changer la pile.

Quand ? Approximativement tous les 8 jours. Un signal sonore est émis par l'aide auditive quand la pile est à changer.


Comment ?

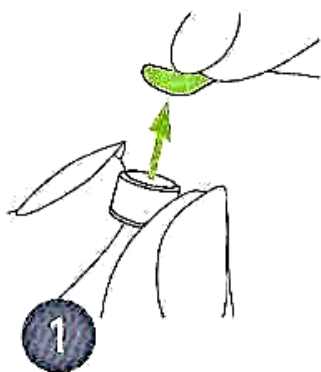

Retirez
l'adhésif de
protection de
la pile neuve.

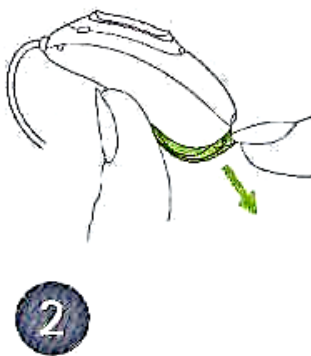

Ouvrez le
compartiment
pile. Retirez
l'ancienne pile.

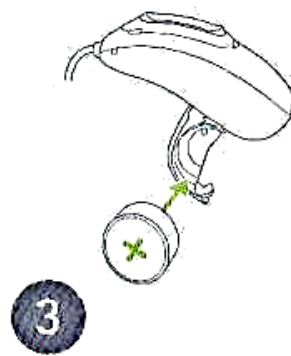

Placer la pile dans le
compartiment pile avec
le signe « + » vers le
haut.