


CHANGEMENT DES PARES-CERUMEN NOWAX

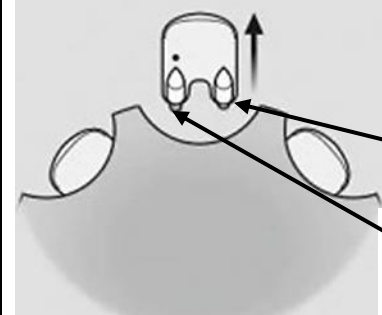

Changer les pares-cérumen :

	Bras pour retrait. Bras avec nouveau pare-cérumen.	1. Retirez l'outil de la coque. Cet outil a deux bras : l'un pour le retrait et l'autre pour l'insertion du nouveau pare cérumen.
		2. Insérez le crochet au bout du bras pour le retrait du pare-cérumen à changer.
		3. Retirez le pare-cérumen usagé en tirant l'outil.
		4. Insérez le nouveau pare-cérumen.
		5. Appuyez légèrement. Pas besoin de visser.
		6. Retirez l'outil et le jeter.