


CHANGEMENT DES DOMES ET DES PARES-CERUMEN

Retirer les dômes :

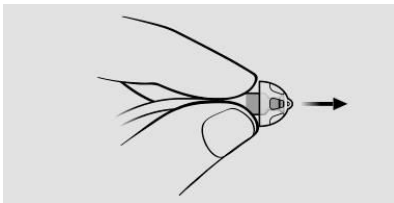


Bien tenir l'écouteur.
Pincez au bout du
dôme et le retirer.




Changer les pares-cérumen CeruStop

	1. Prenez le bâtonnet dans l'étui CeruStop.
	2. Enfoncez-le sur l'embout de vos aides auditives afin de retirer l'ancien pare-cérumen.
	3. Tirez sur le bâtonnet pour retirer le pare-cérumen usagé.
	4. Retournez le bâtonnet afin de placer le nouveau pare-cérumen qui se trouve sur l'autre extrémité du bâtonnet.
	5. Insérez le nouveau pare-cérumen sans visser et jetez le bâtonnet.

Mettre un nouveau dôme :

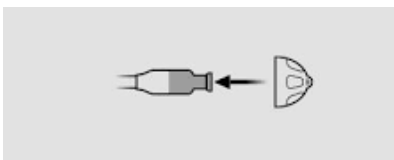

Placez l'écouteur
exactement au milieu
du dôme.

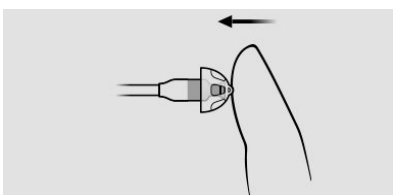

Appuyer fermement
sur le dôme afin qu'il
soit bien fixé.