



NETTOYAGE DE L'EMBOUT

1 Déconnecter le tube du coude

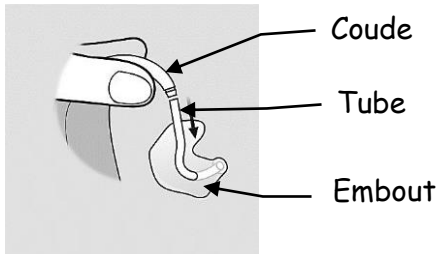

2 Préparer la solution de trempage et nettoyage

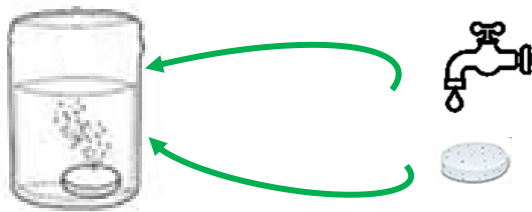

Mettez un comprimé dans le gobelet avec de l'eau afin d'obtenir une solution de trempage.




Placez l'embout dans la partie plastique transparente grillagée.
Immergez complètement les embouts auriculaires dans la solution obtenue et laissez agir de 15 à 45 minutes.




Rincez soigneusement.

3 Sécher avec la poire

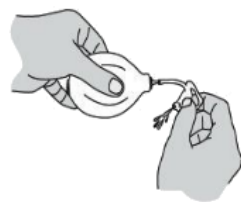

Insérez la pointe fine de la poire dans le tube et soufflez en appuyant sur la poire. L'air soufflé va assécher l'intérieur du tube et de l'embout.

4. Identifier les appareils et reconnecter le coude au tube

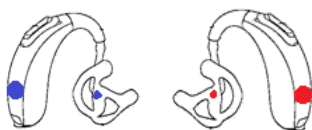

L'embout droit a un point rouge et l'aide auditive droite a une marque rouge.
L'embout gauche a un point bleu et l'aide auditive gauche a une marque bleue.