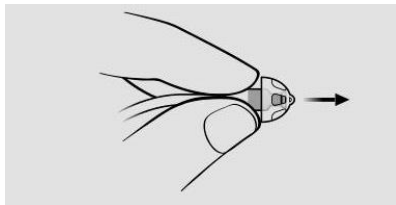


CHANGEMENT DES DOMES ET DES PARES-CERUMEN

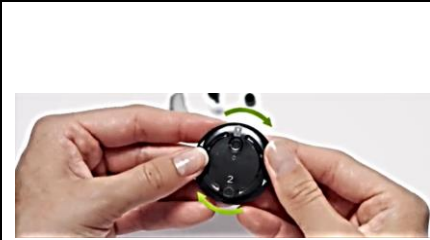
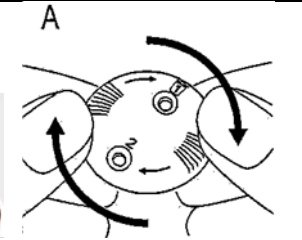
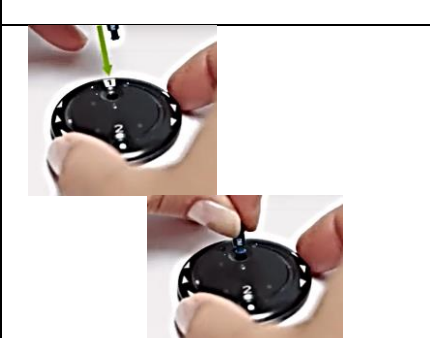
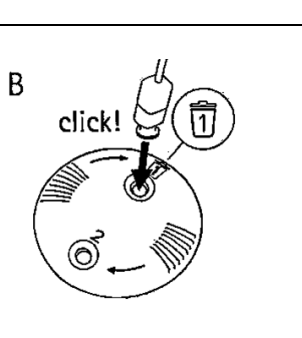
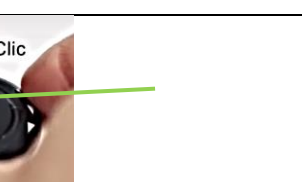
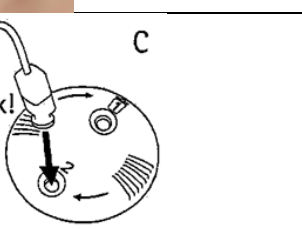
Retirer les dômes :




Bien tenir l'écouteur.
Pincer au bout du
dôme et le retirer.




Changer les pares-cérumen :

	A 	Sans appuyer, glisser vos pouces en suivant le sens des flèches : l'encoche 1 sous la poubelle doit être vide et l'encoche 2 doit avoir un pare-cérumen blanc.
	B 	Placer l'écouteur bien en face de l'encoche 1 sous la poubelle. Appuyer légèrement. Puis tirer sur l'écouteur.
	Clic 	Le pare-cérumen reste dans l'encoche.
	C 	Répéter le geste dans l'encoche n° 2 pour mettre un nouveau pare-cérumen.

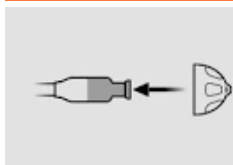Mettre un nouveau dôme :



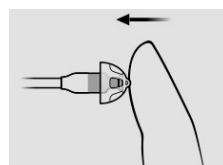Placer l'écouteur
exactement au milieu
du dôme



Appuyer fermement
sur le dôme afin qu'il
soit bien fixé.